


Verificare i sintomi di arresto cardiaco improvviso:

non risponde non respira regolarmente


1

ACCENDERE

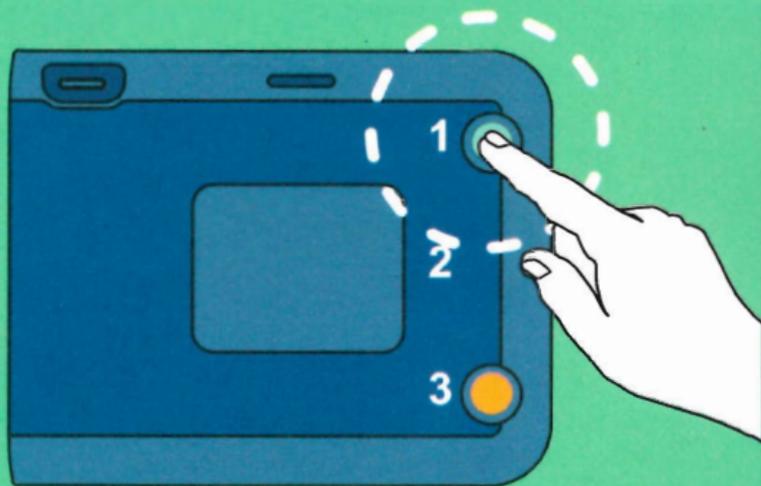


2

**Posizionare
gli elettrodi**

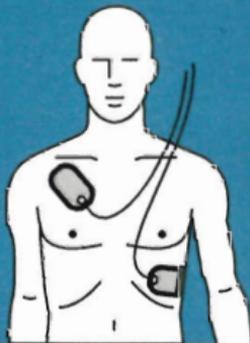

3


**Premere
il pulsante
di scarica**

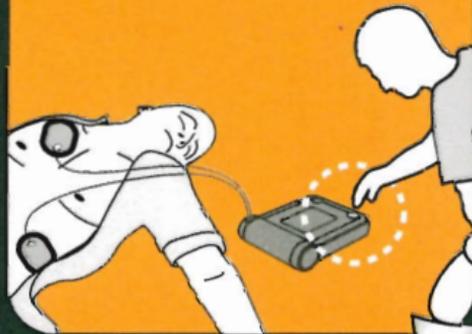

GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO


1

ACCENDERE

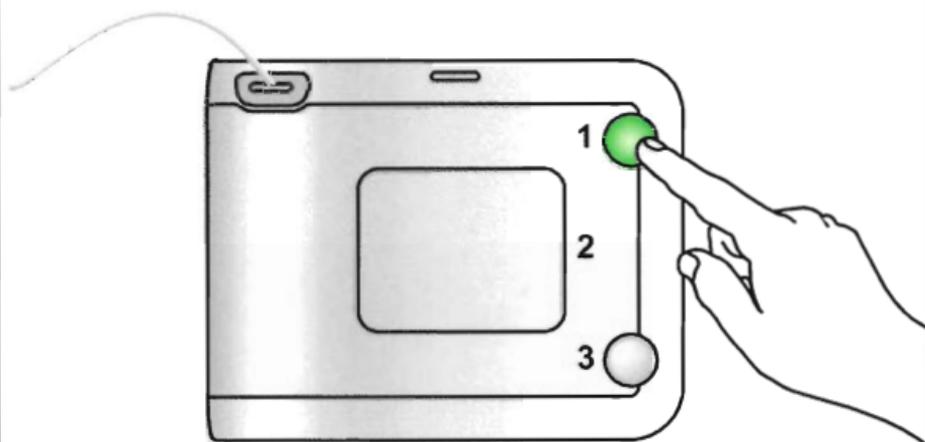

2

Torace nudo. Pulire e asciugare se necessario.

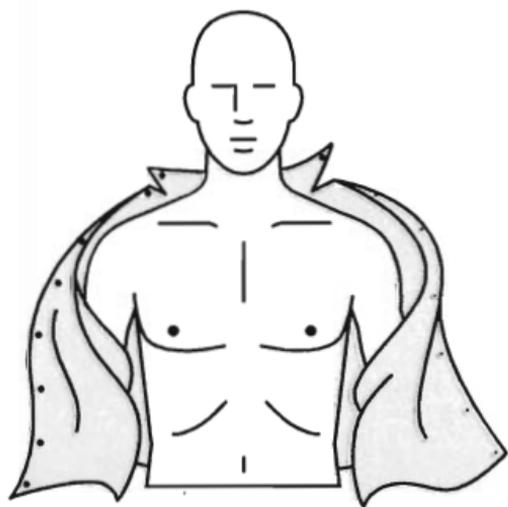


3

Aprire il contenitore grigio degli elettrodi.





4

Staccare ogni elettrodo.

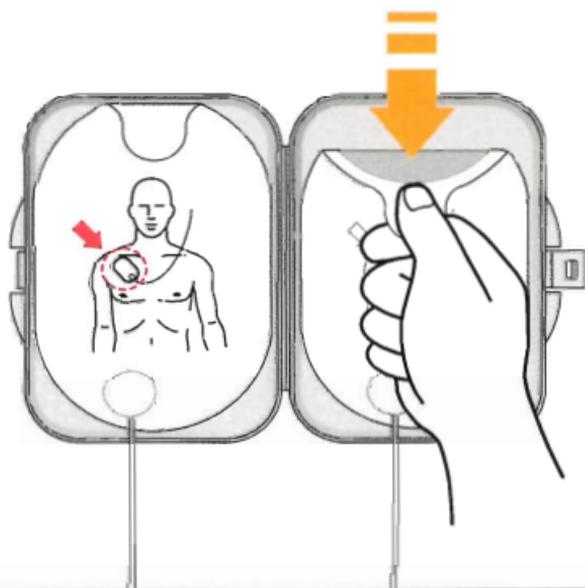

5

Posizionare gli elettrodi
sul torace.

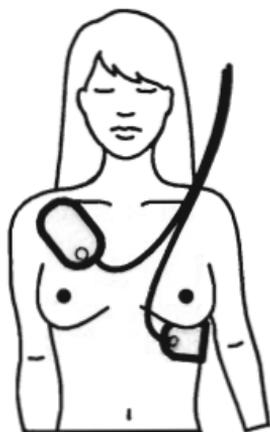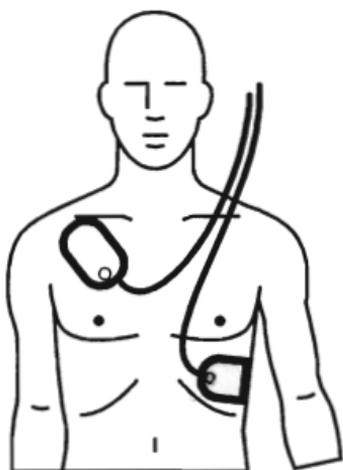

6

Analisi... stare indietro

ATTENDERE
FINO A CHE




SMETTE DI
LAMPEGGIARE



7

Premere il pulsante arancione di scarica lampeggiante.

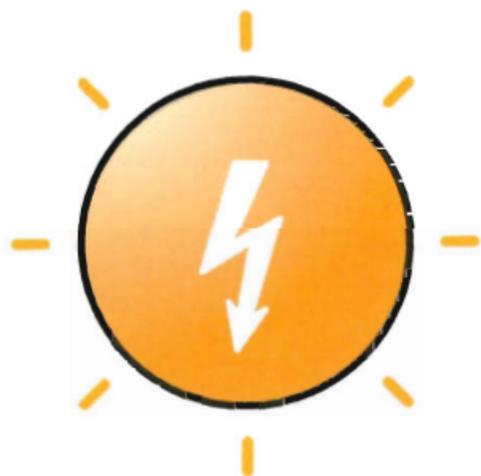

8

Soccorso RCP: premere il pulsante lampeggiante blu.




PEDIATRICO

< 25 kg (0-8 anni)



PEDIATRICO

Inserire l'attivatore all'inizio
del soccorso.

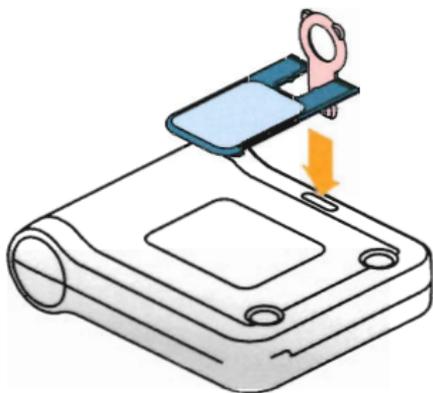

Posizionare gli elettrodi
sul torace e sulla schiena.

